



« Pour ma fille, j'ai choisi un examen sans douleur: le FibroScan®. »

## FibroScan, ça change quoi pour moi ?

- FibroScan donne un résultat immédiat, c'est simple et rapide (5 -10 minutes).
- C'est un examen non invasif et sans douleur.
- En cas de surveillance étroite, l'examen peut être répété sans danger.



Les sondes du FibroScan sont adaptées à la morphologie du patient



100% des patients acceptent l'examen FibroScan®(2)

INFORMATIONPATIENTFR16052014 - Version du 16/05/14 - Le FibroScan® est un dispositif médical fabriqué par Echosens. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Le FibroScan® est destiné à mesurer de façon non-invasive l'élasticité (E) et l'atténuation ultrasonore contrôlée (CAP) hépatique chez l'Homme.

Il est expressément recommandé de lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et l'étiquetage qui accompagnent le dispositif. Les examens doivent être réalisés uniquement par un opérateur certifié par le fabricant ou son représentant local accrédité. Le dispositif FibroScan® ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : organe autre que le foie, patients ayant des dispositifs implantables actifs (tels que pacemaker, défibrillateur, pompe, etc.), sur les plaies et chez les femmes enceintes. La présence d'ascite est susceptible d'empêcher l'obtention de mesures valides. Les valeurs obtenues doivent être interprétées par un médecin spécialiste des maladies du foie, en prenant en compte l'ensemble du dossier médical du patient.

1. Mueller, S. and L. Sandrin, Liver stiffness: a novel parameter for the diagnosis of liver disease. *Hepatic Medicine: Evidence and Research*, 2010: p. 49-67

2. Melin, P., et al., Dépistage non invasif de la fibrose : Intérêt du FibroScan® en consultation d'alcoologie [Noninvasive screening of fibrosis: interest of FibroScan® in alcohol addiction consultation]. *Alcoologie et Addictologie*, 2005;27:191-196.



FibroScan®  
BY ECHOSENS  
EN SAVOIR PLUS : WWW.ECHOSENS.COM



FLASHEZ CE CODE

INFORMATION PATIENT  
EXAMEN FIBROSCAN®



Un examen non-invasif, rapide et indolore de votre foie...

Connaissez-vous le FibroScan® ?

FibroScan®



« **Rapide & sans anesthésie, le suivi de ma maladie avec FibroScan® est plus confortable.** »

## FibroScan, qu'est ce que c'est ?


Le diagnostic par FibroScan, aussi appelé *élastographie impulsionnelle*, est une technique qui permet de déterminer la dureté du foie (exprimé en kPa équivalent de fibrose) sans pénétrer à l'intérieur du corps humain.

Le résultat est délivré immédiatement, il révèle l'évolution de l'état de santé du foie et permet au médecin de faire un diagnostic et un suivi, indépendamment des traitements ou facteurs périphériques.

Cela peut aider à anticiper diverses complications, à suivre et évaluer les dommages causés par la maladie telle que la cirrhose.

### LA DURETÉ DU FOIE DÉTERMINE L'ÉTAT PATHOLOGIQUE

Foie mou = état normal

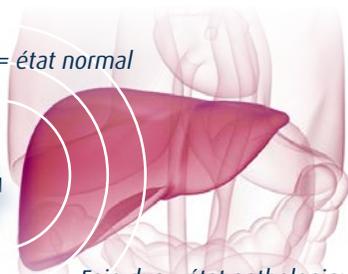

Foie dur = état pathologique

Le FibroScan mesure la dureté du foie qui varie en fonction de l'inflammation des tissus et du taux de fibrose<sup>(1)</sup>.

## Est-ce douloureux ? Non.

L'examen FibroScan est sans douleur et rapide. Au moment de la mesure, vous ressentirez une légère vibration au point de contact de la sonde sur la peau.

## Comment se déroule l'examen FibroScan ?

- Vous êtes allongé sur le dos, le bras droit relevé derrière la tête. Le médecin applique un gel à base d'eau sur la peau au niveau des côtes et positionne la sonde en exerçant une légère pression.
- L'examen comprend 10 mesures successives faites au même endroit.
- Le résultat est délivré en fin d'examen, c'est un chiffre qui correspond à la médiane en kPa entre 1,5 et 75. Il sera interprété par votre médecin.

## Que fait-on du résultat ?

Votre médecin analyse le résultat (la médiane) à la lumière des données de votre dossier et en fonction de votre maladie.



« **Lorsque mon médecin m'a proposé l'examen FibroScan®, j'ai immédiatement accepté.** »

## À retenir

*Le résultat du FibroScan® permettra à votre médecin d'évaluer dans le temps l'état de santé de votre foie avec ou sans traitement.*

## Recommandations d'usage

*Avant d'entreprendre la mesure de l'élasticité hépatique avec le FibroScan®, il est recommandé d'attendre 2 voire 3 heures après un repas.*

## Qui peut me prescrire l'examen FibroScan ?

Votre médecin traitant ou votre hépatologue vous indiqueront le moment venu le lieu le plus adapté pour passer cet examen.

## Pour en savoir plus

*Rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre hépatologue.*

